


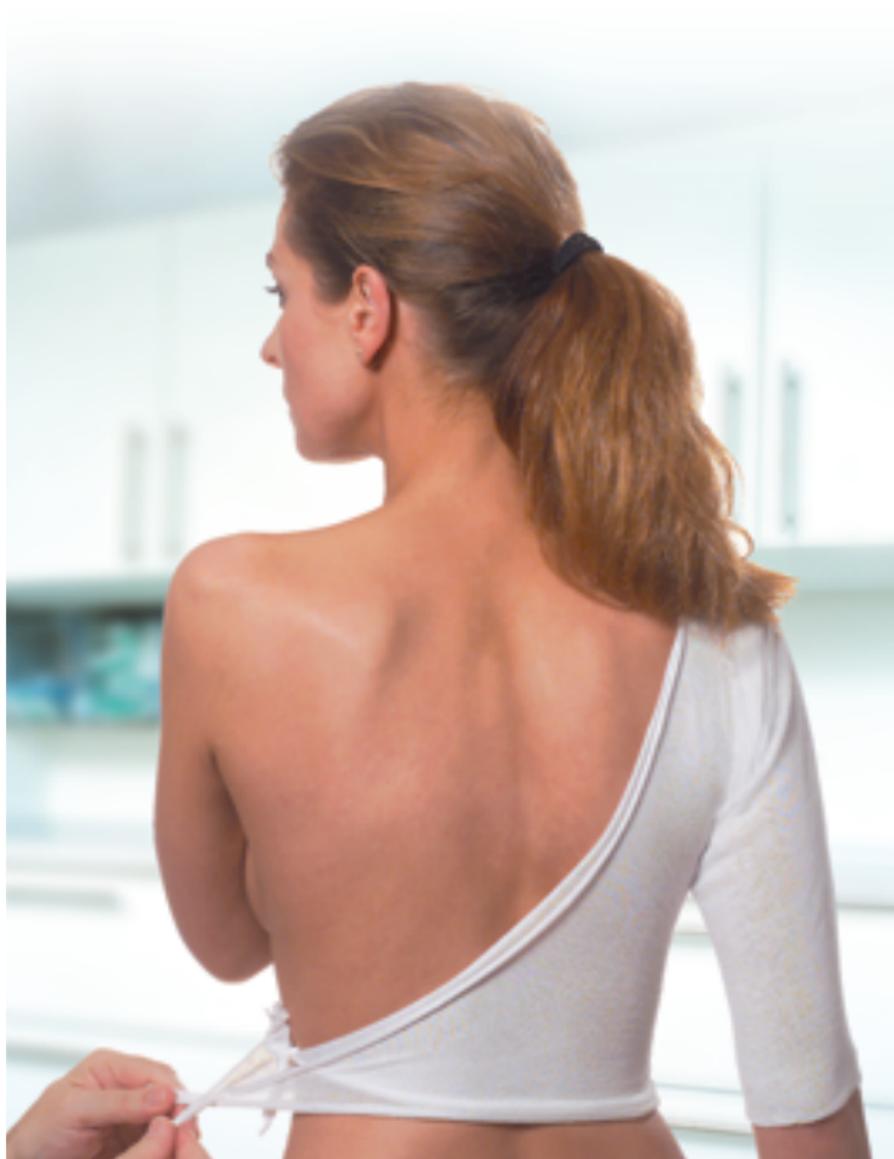

# Stülpa®

Anleitung zur Verbandfixierung  
mit Schlauchverbänden



# Inhalt

	Seite
Wichtiges über Stülpa .....	3
Alle Größen auf einen Blick .....	4
Finger-/Zehenverband .....	6
Fäustling .....	8
Ellenbogen-/Knieverband .....	10
Kopfverband .....	12
Verband nach Desault .....	14
Hemdchenverband.....	16
Achselhöhlenverband .....	18
Mammaverband .....	20
Fußverband .....	21
Kompressionsverband .....	22
Zinkleimverband .....	24

# Alle Größen auf einen Blick

## Stülpa-Fertigverbände

- Gr. 1           Fingerverbände
- Gr. 3           Hand-, Fuß- und Beinverbände,  
Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- Gr. 4           Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände,  
Gesichtsmasken

## Stülpa-Rollen

- Gr. 0R          Kinderfinger- und Zehenverbände
- Gr. 1R          Fingerverbände
- Gr. 2R          Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
- Gr. 3R          Hand-, Fuß- und Beinverbände,  
Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- Gr. 4R          Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände,  
Gesichtsmasken
- Gr. 5R          Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und  
Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- Gr. 6R          Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
- Gr. 7R          Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
- Gr. 8R          Desault- und Rumpfverbände

# Fingerverband/Zehenverband

**Abmessung:**

- a) Stülpa Gr. OR oder Stülpa Gr. 1 R, ca. 5 x Fingerlänge
- b) Stülpa Gr. 1; gebrauchsfertig

---

## Fingerverband

- a) Stülpa-Schlauch bis auf 1 x Fingerlänge raffen. Offenes Schlauchstück über den Finger führen. Gerafften Teil an der Fingerkuppe zweimal um seine Achse drehen.
- b) Beim Stülpa-Fertigverband offenes Schlauchstück über den Finger führen.



---

Gerafften bzw. gerollten Teil bis zum Fingeransatz stülpen.



---

Wulst auf der Innenhand durchschneiden;



# Fäustling

## Abmessung:


- a) Je nach Handgröße Stülpa Gr. 2 R oder Gr. 3 R, 3 x Handlänge
  - b) Stülpa Gr. 3; gebrauchsfertig
- 



- a) Schlauch auf ca. 3-fache Handlänge zuschneiden.  
Einschnitt für Daumen bei ca. einer halben Handlänge.
- 



- a) Ende des Stülpa-Schlauches bis zum Handgelenk führen, und dabei Daumen durchstecken.
  - b) Beim Stülpa-Fertigverband offenes Schlauchstück bis zum Handgelenk führen, und dabei Daumen durchstecken.
- 

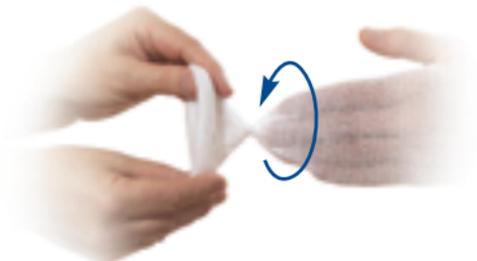

- a) Rest raffen und zweimal um seine Achse drehen.
- b) Beim Fertigverband entfält die Drehung.  
Gerafften bzw. gerollten Teil über den Daumen stülpen.

# Ellenbogenverband/ Knieverband

**Abmessung:**

Je nach Armumfang Stülpa Gr. 2 R,  
3 R oder 4 R, 4 x Länge des  
vorgesehenen Verbandes

---

## Ellenbogenverband



Stülpa-Schlauch rafften, dehnen  
und ein Ende über den Ellen-  
bogen führen.  
Gerafften Teil durch Drehen in  
Oberarmmitte verankern.

---

Unter Drehen bis zur Unter-  
armmitte führen und verankern.



Unter Drehen über die erste  
Lage zur Oberarmmitte  
zurückführen.



# Kopfverband

## Abmessung:

- a) Je nach Kopfgröße Stülpa Gr. 3 R, 4 R oder 5 R, 2 x Kopfumfang
  - b) Stülpa Gr. 3 oder Gr. 4, gebrauchsfertig
- 



- a) Zwei Drittel des Stülpa-Schlauches aufrollen. Offenes Schlauchstück rafften, dabei stark dehnen
  - b) Beim Stülpa-Fertigverband offenes Schlauchstück rafften, dabei stark dehnen
- 



und als Haube über den Kopf stülpen.

---



- a) Gerollten Teil ganz ausziehen, stark dehnen, rafften, zweimal um seine Achse drehen und an der Stirn beginnend über die erste Lage führen.
- b) Durch die Abbindung beim Stülpa-Fertigverband entfällt die Drehung um die Achse.

# Verband nach Desault

## Achsel, Schulter, Ellenbogen

**Abmessung:**

Je nach Brustumfang Stülpa  
Gr. 7 R oder Gr. 8 R, 3 x Abstand  
Schulter – Ellenbogen



Ein Stülpa-Ende so umschlagen,  
dass ein doppelter Schlauch  
entsteht.



Schlauch raffen, dabei dehnen  
und über beide Arme bis zur  
Taille führen. Von unten bis unter  
die Achseln ziehen, so dass der  
geraffte Teil unten bleibt.  
Obere Kante umschlagen.  
Hand und Achselhöhle polstern.



Schlauchende über den Arm und  
eine Schulter hochschlagen.

# Hemdchenverband

## Abmessung:

Je nach Körpergröße Stülpa  
Gr. 5 R, 6 R, 7 R oder 8 R,  
doppelte Länge des  
vorgesehenen Verbandes



## Version 1

Stülpa-Schlauch raffen, dabei  
dehnen und von unten her bis  
zur Achselhöhle ziehen.



An einer Seite unter der Achsel-  
höhle senkrecht einschneiden.



Zipfel ausziehen und auf der  
Schulter trägerartig verknoten.

# Achselhöhlenverband

**Abmessung:**

Je nach Körpergröße Stülpa  
Gr. 3 R, 4 R oder 5 R, reichlich  
Brustumfang



Zwei Drittel des Stülpa-Schlauches  
aufrollen, und mit der Rolle vor-  
aus bis zur Achselhöhle ziehen.



Rolle 1 x vorne und 1 x hinten  
durchschneiden.



Nun beide Rollenenden mittig  
durchschneiden.

# Mammaverband

**Abmessung:**

Je nach Brustumfang Stülpa  
Gr. 7 R oder Gr. 8 R,  
2 x Brustumfang



Ein Stülpa-Ende durch das andere ziehen, so dass ein doppelter Schlauch entsteht.  
Verband über den Arm führen. Das umgeschlagene Ende liegt unterhalb des Ellenbogens. Gerafften Teil auf der Schulter durchschneiden.



Zipfel nach unten ziehen und verknöten.



Am Arm Zipfel ausziehen, nach vorn umschlagen und mit Pflasterstreifen fixieren.

# Kompressionsverband

**Abmessung:**

Je nach Beinumfang Stülpa  
Gr. 2 R, 3 R, 4 R oder 5 R,  
 $2\frac{1}{2}$  x Abstand Zehen-  
spitze – Ferse – Knie



Eine Hälfte des Stülpa-Schlauches  
aufrollen. Offenes Schlauchstück  
bis unter das Knie führen,



Evtl. darüber Polsterwatte wickeln  
und einen Kompressionsverband  
anlegen.



Den Kompressionverband mit  
einem oder mehreren  
Pflasterstreifen fixieren.

# Zinkleimverband

## Abmessung:

Je nach Beinumfang Stülpa  
Gr. 2 R, 3 R, 4 R oder 5 R,  
 $2\frac{1}{2}$  x Abstand Zehen-  
spitze – Ferse – Knie



Eine Hälfte des Stülpa-Schlauches  
aufrollen. Offenes Schlauchstück  
bis unter das Knie führen.



Von den Zehengrundgelenken  
beginnend eine Varolast-  
Zinkleimbinde in der üblichen  
Weise anlegen.



Gerollten Teil unter Drehen über  
die Zinkleimbinde ziehen.  
Dabei darauf achten, dass kein  
Wulst entsteht.

# NOTIZEN



PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim  
Deutschland

PAUL HARTMANN Ges.mbh  
2355 Wiener Neudorf  
Österreich

IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen  
Schweiz

**Besuchen Sie uns im Internet:  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)**