



HARTMANN aide à soigner

Indications

Hydrocoll® convient au traitement des plaies à sécrétion faible à modérée, abondante en particulier dans le cas de plaies chroniques montrant une mauvaise tendance de guérison et une granulation lente et difficile, comme p. ex. les ulcères de jambes ou les escarres de décubitus. Dans le cas de plaies infectées, il est indiqué de procéder d'abord – jusqu'à élimination de l'infection – à un traitement en milieu humide avec le pansement TenderWet® ou à un traitement avec la compresse d'alginate de calcium Sorbalgon®.



Formes commercialisées	REF	Taille	Unité	Carton original
Hydrocoll®	900 740	5 x 5 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
	900 742	7.5 x 7.5 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
	900 744	10 x 10 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
	900 748	15 x 15 cm	Boîte à 5 pansements	16 unités
	900 749	20 x 20 cm	Boîte à 5 pansements	16 unités
Hydrocoll® thin	900 757	7.5 x 7.5 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
	900 758	10 x 10 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
	900 760	15 x 15 cm	Boîte à 5 pansements	16 unités
Hydrocoll® concave	900 756	8 x 12 cm	Boîte à 10 pansements	20 unités
Hydrocoll® sacral	900 755	12 x 8 cm	Boîte à 5 pansements	16 unités

Hydrocoll®

Un pansement bien conçu dans tous ses détails pour des résultats cliniques convaincants – le progrès de la qualité



IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

T +41 (0)52 674 31 11
F +41 (0)52 672 74 41
www.hartmann.info

Hydrocoll®: pour toutes les formes de plaies

Tailles variées également pour petites plaies



Hydrocoll®




Hydrocoll® thin



Hydrocoll® concave



Hydrocoll® sacral

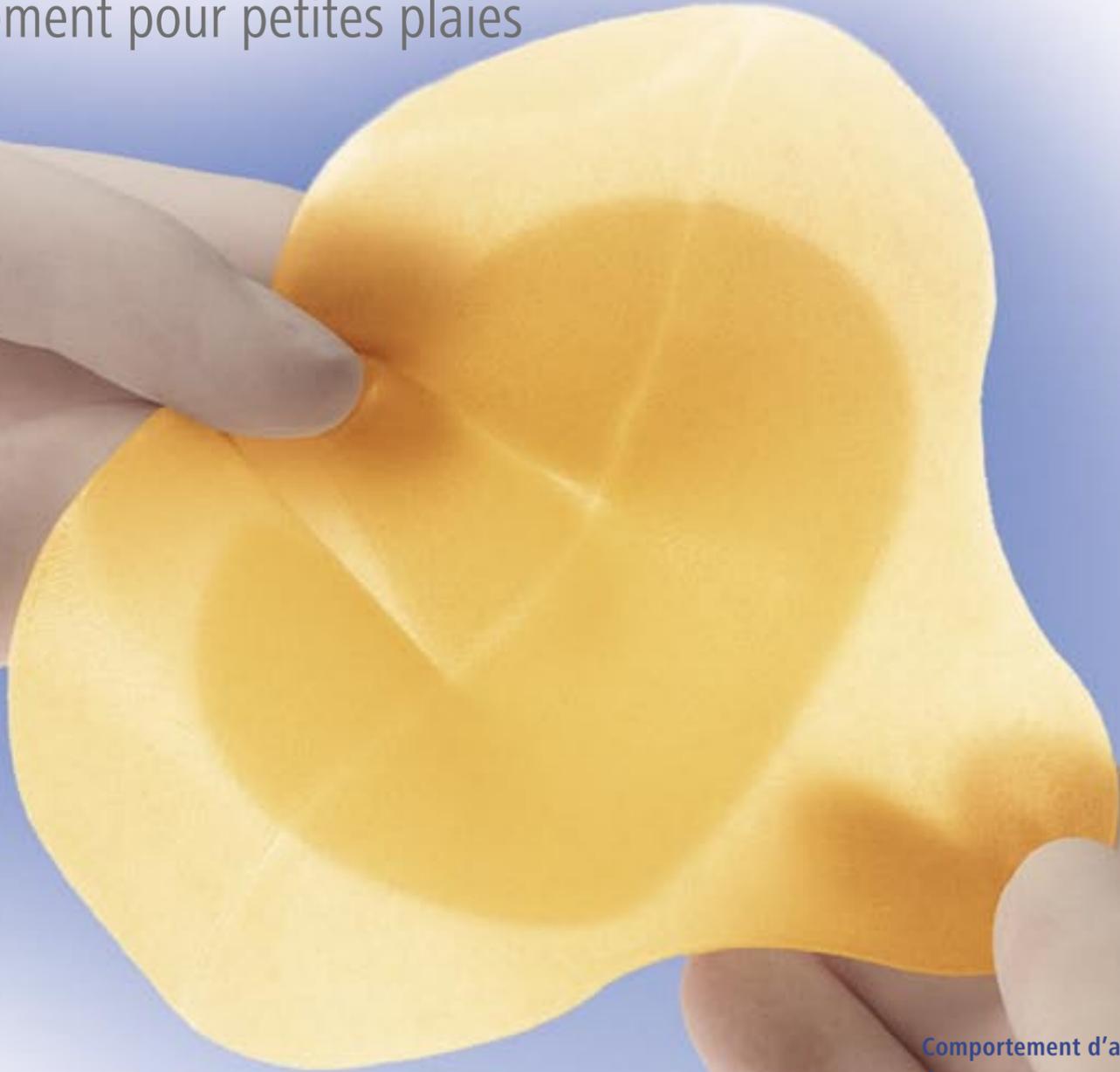

Hydrocoll®

– désormais
avec une efficacité
encore accrue

En collaboration étroite avec les praticiens et les soignants expérimentés, HARTMANN a encore perfectionné Hydrocoll® de façon décisive. Vous serez convaincu par les résultats.

Votre avantages

- Capacité d'absorption particulièrement puissante et rapide
- Matériau élastique de faible épaisseur, permettant une parfaite adaptation à l'anatomie
- Excellente adhésion initiale
- Hydrocoll® peut être retiré d'une seule pièce, ce qui par conséquent ne laisse pratiquement aucune trace de gel dans la plaie.
- Ce nouveau matériel ultraflexible assure un confort particulièrement élevé.
- La légère transparence d'Hydrocoll® facilite la mise en place sur la plaie.
- La nouvelle forme du noyau hydrocolloïde permet de réduire les coûts de traitement des plaies.

Exemple d'une guérison de plaie avec traitement par Hydrocoll®



1. Escarre superficielle après élimination de la peau abîmée et application d'Hydrocoll®. La légère transparence d'Hydrocoll® permet de vérifier la mise en place exacte du pansement.




2. L'excellent pouvoir d'absorption permet de laisser le pansement en place plusieurs jours. Ensuite, Hydrocoll® peut être retiré en entier de la plaie.



3. Épithélisation complète de la plaie au bout d'un traitement de deux semaines avec Hydrocoll®.

Comportement d'absorption du nouveau pansement Hydrocoll®

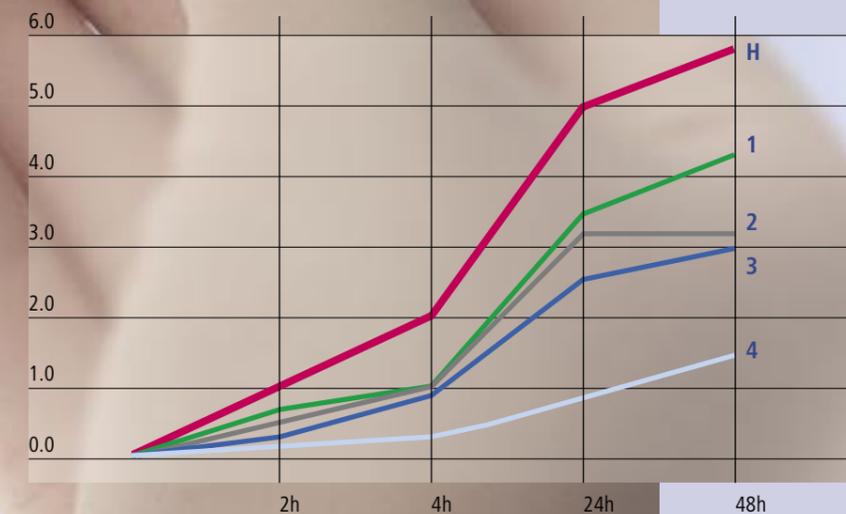

H = le nouveau pansement Hydrocoll®
1 à 4 = produits de la concurrence

Les études en laboratoire confirment que les pansements de la nouvelle génération Hydrocoll® absorbent nettement plus vite les sécrétions des plaies que les pansements usuels en hydrocolloïde. Hydrocoll® offre ainsi une excellente protection contre les écoulements, notamment dans le cas de plaies à sécrétion abondante.

Comportement du nouveau pansement Hydrocoll® en comparaison avec des produits concurrents de la même catégorie. Capacité d'absorption en grammes de sérum physiologique par gramme de produit. Déroulement sur 48 heures.