

Einmalpumpe

Eurospender 1 plus und 1 plus touchless

Hygienisch sicher und einfach für den Einmalgebrauch



Einmalpumpe Eurospender 1 plus und 1 plus touchless

Die einfache Lösung, die nicht nur ein Höchstmass an Hygiene sicherstellt, sondern auch den Aufbereitungsaufwand der Edelstahlpumpe überflüssig macht.

Charakteristik

- Kunststoff-Pumpe mit Flügeln, die den hygienischen Einmalgebrauch sicherstellen
- aufwendige Aufbereitung der Edelstahlpumpe entfällt
- einfaches Austauschen der Pumpe beim Flaschenwechsel
- geeignet für Hände-Desinfektionsmittel, Wasch*- und Pflegelotionen*
- einsetzbar für alle marktüblichen Flaschen
- einzel verpackt im Beutel für hygienisches Einsetzen der Pumpe
- enthalten keine Metallkomponenten und können Recycling-Kreisläufen zugeführt werden


Technische Daten

- Applikationsmenge: 1,3 ml pro Hub (nicht einstellbar)
- nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar


* abhängig von der Viskosität kann ein mehrmaliges Anpumpen möglich sein




Montageanleitung der beiden 500 ml- und 1 l-Einmalpumpen

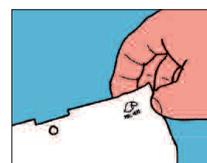

1. An der auf der Verpackung gekennzeichneten Stelle ziehen

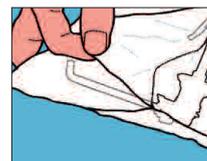

2. Öffnen Sie die Verpackung an der Seite des Pumpenzylinders

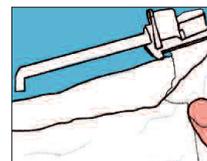

3. Nehmen Sie die Einmalpumpe mit der Verpackung in die Hand



4. Setzen Sie die Einmalpumpe in den Spender ein

Einmalpumpe Eurospender 1 plus und 1 plus touchless

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer
für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981681
für 1000 ml-Flaschen	1 Stück	981682